



- Natural Ceramic System **DSL**
- Natural Ceramic System **HT**
- Natural Ceramic System **LF**
- Natural Ceramic System **ZiR**

ENAMEL SC

SC57 - SC58 - SC59 - SC60 SMALTI

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -



DENTAL CERAMIC

 ITALIAN STYLE

Natural ENAMEL SC

SMALTI SC57, SC58, SC59, SC60

Gli smalti Natural ENAMEL SC sono polveri ceramiche per la stratificazione avanzata nelle aree incisale e smalto; grazie alla calibrazione della luminosità e traslucenza contribuiscono a creare un effetto molto realistico e naturale.

Le masse smalto incisale ENAMEL SC sono realizzate con una tonalità di grigio crescente (da SC57 più chiaro, a SC60 più scuro).

Le masse smalto incisale ENAMEL SC possono essere utilizzate sia pure, per realizzare l'intera zona smalto, per ottenere differenti risposte cromatiche: come una elevata luminosità del piatto incisale e delle creste incisali per elementi molto giovani e luminose (SC57), oppure una grande profondità incisale e delle aree vicino ad elementi scuri o devitalizzati (SC60).

Le masse smalto incisale ENAMEL SC inoltre possono essere miscelate con le altre masse di stratificazione, modificatori dentali, altri modificatori e intensivi per ottenere delle masse personalizzate.

Le masse smalto incisale ENAMEL SC possono essere lavorate anche con una stratificazione a contrasto con gli altri smalti ENAMEL S (S1, S2, S3, S4, S57, S58, S59, S60) con cui è possibile ottenere effetti altamente estetici e naturali: in questo modo è possibile caratterizzare nei minimi dettagli ciascun restauro.

Le masse smalto ENAMEL SC hanno la capacità di aumentare l'effetto incisale, sia proprio sia delle altre masse smalto permettendo di ottenere effetti maggiormente marcati e netti.

Le masse incisali ENAMEL SC sono realizzate per rispondere alle più alte e svariate esigenze estetiche: permettono di modificare a piacere il valore, l'opalescenza, la luminosità e la traslucenza delle aree incisali, interprossimali e, se lo si desidera, anche del colletto.

Natural ENAMEL SC

SMALTI SC57, SC58, SC59, SC60


SC57: smalto caratterizzato da massima luminosità, minimo punto di grigio, ottimo per le tinte più chiare della scala A-D, bleached; ideale per elementi molto giovani e vitali e per aumentare il valore.




SC58: smalto caratterizzato da un'alta luminosità, basso punto di grigio, ottimo per tinte chiare della scala A-D; ideale per ricreare elementi adulti ma non ancora anziani.



SC59: smalto caratterizzato da una bassa luminosità, punto di grigio intermedio, ottimo per riprodurre gli elementi più grigi della scala A-D; ideale per i denti adulti e anziani e per abbassare il valore.

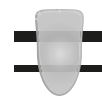

SC60: smalto caratterizzato da una minima luminosità, elevato punto di grigio, ottimo per caratterizzare gli elementi più scuri, saturi e cromatici della scala A-D; ideale per ricreare elementi molto anziani e abbassare molto il valore.

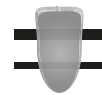

Le masse smalto ENAMEL SC sono disponibili per tutte le linee di ceramica Natural Ceramic System.



- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

Natural ENAMEL SC

Natural[®]

CERAMIC
SYSTEM



Natural Ceramic System è la gamma più completa di ceramiche dentali per il successo del tuo laboratorio

Natural Ceramic System is the most complete range of dental ceramics for the success of your laboratory

DSL lingotti di silicato di litio per pressata

DSL pressable lithium silicate ingots

HT ceramica per leghe tradizionali, adatta alla stratifica su struttura in lega e alla pressata in ceramica integrale

HT ceramic for traditional alloys, suitable for layering on alloy frame and pressing full ceramic restorations

LF ceramica per leghe universali, adatta alla stratifica e alla pressata su struttura in lega e ceramica integrale

LF ceramic for universal alloys, suitable for layering and pressing both on alloy frame and full ceramic restorations

ZiR ceramica speciale per zirconio e silicato di litio per stratifica e pressata sia su zirconio sia in ceramica integrale

ZiR special ceramic for zirconia and lithium silicate for layering and pressing both on zirconia frame and full ceramic restorations

STAINS supercolori in polvere e pasta universali, luminosi e lucidi, altamente fluorescenti

STAINS universal, bright and glossy, highly fluorescent powder and paste stains

GLAZE FX una gamma completa di materiali per glasura: polvere, pasta, pasta fluorescente e spray fluorescente

GLAZE FX a full array of glazing materials: powder, paste, fluorescent paste and fluorescent spray

MASTER SET masse colorate per colori fuori scala A-D

MASTER SET advanced shades for off-scale colors A-D

MONO-LAYER The One è l'originale ceramica mono-massa per leghe e zirconio

MONO-LAYER The One is the original mono-layer ceramic for alloys and zirconia

MICRO-LAYER polveri e paste speciali per micro-stratificazione su silicato di litio e zirconia integrale

MICRO-LAYER special powders and paste for micro-layering on lithium silicate and full contour zirconia

CRYSTAL set completo di paste speciali per micro-stratificazione su zirconia, silicato di litio e leghe-ceramiche tradizionali

CRYSTAL special ceramic pastes for micro-layering on zirconia, lithium silicate and traditional alloys-ceramic

Natural Ceramic System: ceramica dentale, stile italiano

Natural Ceramic System: dental ceramics, italian style

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 **TRESSIS ITALIA srl**

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

TEL: (+39) 0438 41 83 16

WEB: www.tressis.it

MAIL: tressisitalia@gmail.com



DISTRIBUTED BY: