

Natural

LIQUID

Natural LIQUIDS

Liquidi UNIVERSALI di MODELLAZIONE

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 tressis italia®

DENTAL CERAMIC



ITALIAN STYLE

Natural LIQUIDS

SELEZIONE DI LIQUIDI SPECIALI PER CERAMICA

Natural LIQUIDS è la gamma di liquidi universali per le ceramiche Natural, tutti i liquidi possono cioè essere utilizzati con tutte le linee di ceramica Natural HT, LF e ZiR.

Tutti i liquidi Natural LIQUIDS sono prodotti in ottemperanza alle leggi e alle normative europee e non contengono elementi inquinanti per la ceramica e per l'operatore.

La scelta di un liquido di modellazione adeguato alle proprie abitudini e alle masse utilizzate, può semplificare di molto la stratificazione e avvantaggiare il tecnico durante la realizzazione a pennello degli elementi in ceramica.

Un buon liquido di modellazione deve offrire al tecnico una soluzione pratica, versatile ed efficiente, senza produrre fumi ne' residui inquinanti.

La gamma di liquidi Natural LIQUIDS nasce e si sviluppa proprio per soddisfare le specifiche necessità del ceramista.

INSULATING

LIQUIDO ISOLANTE GESSO - CERAMICA

Liquido isolante per polveri di ceramica e gesso, da applicare sul modello in gesso prima di realizzare la tecnica della massa spalla o la stratificazione tradizionale.

Può essere utilizzato direttamente sul gesso asciutto senza la necessità di imbibire il modello.

ATTENZIONE: non utilizzare per impastare le polveri ceramiche.

Disponibile in flacone da 20ml e 50ml.

OPAQUE POWDER

LIQUIDO PER OPACHI IN POLVERE

Liquido speciale creato per impastare esclusivamente le masse OPACO in POLVERE.

Si raccomanda di NON utilizzare questo liquido con gli opachi in pasta, con il bonding in pasta e con le masse liner da zirconia.

Può essere utilizzato solo con gli opachi in polvere per lega delle linee Natural HT, Natural LF e gli opachi per titanio Natural Ti.

Disponibile in flacone da 20ml e 50ml.

OPAQUE PASTE

LIQUIDO PER OPACHI IN PASTA

Liquido per stemperare gli opachi in pasta delle linee di ceramica Natural HT (High Temperature) e Natural LF (Low Fusion), permette di ottenere la consistenza ideale.

Ideale anche per il bonding in pasta Natural Bond 007.

Non utilizzare con le altra masse di stratificazione, non utilizzare con opachi in polvere.

Disponibile in flacone da 20ml e 50ml.

SHOULDER MASS

LIQUIDO PER MASSE SPALLA

Liquido per impastare e modellare le masse spalla ceramiche.

Il liquido SHOULDER MASS permette una altissima precisione nella modellazione della spalla in ceramica: la formulazione speciale ha una bassissima contrazione durante la cottura.

Si raccomanda di **NON** utilizzare il liquido SHOULDER MASS per impastare masse ceramiche diverse dalle masse spalla.

Disponibile in flacone da 20ml.

MODELING

LIQUIDO PER MODELLAZIONE

Liquido per modellazione universale.

Dotato di una buona plasticità, è indicato per impastare tutte le polveri ceramiche da stratificazione.

Il liquido MODELING LIQUID può essere utilizzato anche per impastare le masse LINER ZiR e per ammorbidire le masse in pasta Natural CRYSTAL e tutte le masse per micro-stratificazione Natural MicroLayering.

Il liquido MODELING LIQUID è il liquido di riferimento utilizzato nelle cotture della ceramica e non necessita di tempi maggiorati di asciugatura rispetto a quanto riportato nelle tabelle di cottura Natural.

Disponibile in flacone da 100ml, 250ml e 1000ml.

MODELING SPECIAL

LIQUIDO DI MODELLAZIONE SPECIALE

Liquido di modellazione speciale, risulta più plastico rispetto al liquido MODELING LIQUID, può essere utilizzato per impastare tutte le masse ceramiche.

Ottima plasticità, ideale per la modellazione di dettagli e creste incisali, si raccomanda di aumentare il tempo di asciugatura e/o chiusura del forno quando si utilizza questo liquido.

Disponibile in flacone da 100ml e 250ml.

MORFOLOGIC SiD & CUSPID

LIQUIDO DI MODELLAZIONE AD ALTISSIMA PLASTICITÀ

Liquido speciale per modellazione.

Questo liquido è indicato per impastare le masse SiD e Cuspid Dentin, Prismatic, etc. può essere utilizzato per aumentare la plasticità degli altri liquidi.

Dotato di altissima plasticità, l'utilizzo di questo liquido è raccomandato quando si vuole realizzare morfologie occlusali altamente dettagliate e complesse.

ATTENZIONE: è necessario aumentare il tempo di asciugatura e/o chiusura del forno quando si utilizza questo liquido.

Disponibile in flacone da 20ml e 50ml.

STAINS & GLAZE

LIQUIDO SPECIALE PER SUPERCOLORI E GLASURA

Liquido speciale per miscelare tutti i supercolori, in polvere e in pasta, e tutte le masse glasura, in polvere e in pasta, della linea Natural Ceramic System.

Può essere utilizzato anche per ammorbidire le masse Natural CRYSTAL e tutte le masse per micro-stratificazione Natural MicroLayering.

Massima plasticità, si raccomanda di aumentare il tempo di asciugatura e/o chiusura del forno quando si utilizza questo liquido.

Disponibile in flacone da 20ml e 50ml.

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 **TRESSIS ITALIA srl**

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

TEL: (+39) 0438 41 83 16

WEB: www.tressis.it

MAIL: tressisitalia@gmail.com



DISTRIBUTED BY: